

„Morgensfach“




1


Befüllung: Entnehmen Sie bitte die Tagesdosierer aus dem Magazin und befüllen Sie die jeweiligen Wochentage mit den benötigten Medikamenten entsprechend Tag und Einnahmezeit (Bild 1). Zur Reinigung entnehmen Sie bitte die Tagesdosierer und entfernen die Deckel (Bild 2, 3). Jetzt können Sie Deckel und Dosiererunterteile reinigen (spülmaschinenfest). Wenn Deckel und Unterteile getrocknet sind, dann klicken Sie die Deckel einfach (Bild 4) in der richtigen Position wieder auf (Einnahmefach morgens ist das größere Fach, Bild 1), bis sie sicher sitzen und für die Entnahme entsprechend verschieben lassen.

Wochentag

Einnahmezeiten

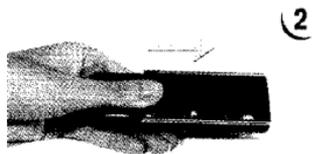

2

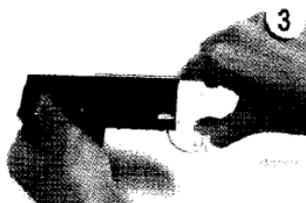

3



4

Entnahme der Medikamente aus dem Tagesdosierer: Der Einnahmetag und die Einnahmezeiten sind auf dem Deckel des Tagesdosierers markiert, das größere Fach („morgens“) befindet sich immer links (Bild 1). Für die Einnahmezeiten „morgens“ bis „nachts“ schieben Sie bitte den Deckel nach rechts (Bild 2), bis das jeweilige Fach frei liegt, entnehmen die Medizin und schieben den Deckel anschließend zurück in die Ausgangsposition, bis der Tagesdosierer verschlossen ist. Für die Entnahme aus dem Bedarfsfach schieben Sie bitte den Deckel des Tagesdosierers nach links, nach der Entnahme nach rechts zurück in die Ausgangsposition (Bild 5).


Bedarfsfach




5



6

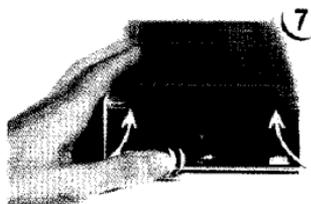

7

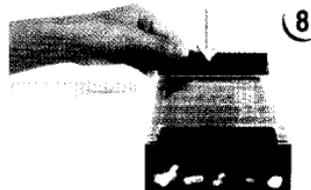

8

Entnahme der Tagesdosierer aus dem Magazin: Der jeweilige Tagesdosierer wird zur Entnahme einfach vorn herausgenommen (Bild 6) und zur Rückgabe auf gleichem Weg durch leichten Druck wieder zurückgestellt (Bild 7). Zum Wechsel des Wochentages werden solange andere Tagesdosierer von hinten in das Magazin eingeschoben (Bild 8), bis der benötigte Wochentag vorn erscheint.