

ist ein schneller Schwangerschaftstest, den Sie ab dem ersten Tag nach Ausbleiben der Periode ganz einfach selbst durchführen können. Der Test reagiert auf das Vorhandensein des menschlichen Hormons Choriogonadotropin (hCG), das bereits im frühen Stadium einer Schwangerschaft im Urin nachzuweisen ist.

\*Gemäß einer klinischen Studie zeigten über 99 % der untersuchten Proben richtige Ergebnisse.

## TEST ZUR EIGENANWENDUNG

### Wie funktioniert der Test?

Bei einer Schwangerschaft wird im Körper der Frau das Hormon hCG gebildet und ist somit im Urin nachweisbar. Der Schwangerschaftstest enthält Antikörper, die speziell mit diesem Hormon reagieren.

Wenn eine Urinprobe auf den Teststab getropft wird, wandert der Urin durch Kapillarkraft entlang der Membran. Sobald das Hormon hCG aus der Probe die Testzone (T) erreicht, erscheint eine klare farbige Linie. Von einem negativen Ergebnis kann man ausgehen, wenn sich keine klare Linie zeigt. Um sicherzustellen, dass der Test richtig ausgeführt wird, erscheint in der Kontrollzone (C) eine farbige Linie.

### Inhalt des Testkits

1. Die Einzelverpackung enthält einen Teststab und Trockenmittel. Das Trockenmittel dient ausschließlich der sachgemäßen Lagerung und wird nicht für die Durchführung des Tests benötigt.
2. Packungsbeilage mit Gebrauchsanweisung

### Was wird noch benötigt?

1. Falls Sie nicht direkt auf den Teststab urinieren möchten, können Sie den Urin in einem Gefäß aus Kunststoff oder Glas auffangen. Das Gefäß muss sauber und trocken sein.
2. Zeitmesser (Uhr oder Stoppuhr)

### Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Testkit ist nur zur äußeren Anwendung bestimmt. Nicht schlucken.
2. Nach Gebrauch entsorgen. Der Teststab kann nur einmal verwendet werden.
3. Das Testkit nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
4. Das Testkit nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder nicht richtig versiegelt ist.
5. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Lagerung und Stabilität

1. Zwischen 4°C und 30 °C in der verschlossenen Einzelverpackung bis maximal zum Verfallsdatum lagern.
2. Vor direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
3. Nicht einfrieren.
4. Die Einzelverpackung erst unmittelbar vor der Durchführung des Tests öffnen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Wann sollte man den Test durchführen?

Jede beliebige Urinprobe eignet sich für den Schwangerschaftstest, jedoch ist der Morgenurin optimal, weil darin die höchste Konzentration an hCG zu finden ist.

### Wie wird der Test durchgeführt?

1. Beginnen Sie den Test, indem Sie den Beutel entlang der Kerbung aufreißen. Nehmen Sie den Teststab aus dem Beutel.
2. Halten Sie das runde Ende des Teststabes mit einer Hand. Mit der anderen Hand entfernen Sie die Kappe und legen die saugfähige Spitze frei.
3. Halten Sie die saugfähige Spitze nach unten zeigend für mindestens 10 Sekunden in den Urinstrahl, bis sie ganz durchfeuchtet ist. **Keinen Urin oberhalb der Pfeilmarkierung gelangen lassen!**
4. Sie können wahlweise auch Urin in einem sauberen Gefäß auffangen und die saugfähige Spitze zur Hälfte für mindestens 3 Sekunden darin eintauchen.
5. Setzen Sie dann die Kappe wieder auf und warten Sie das Erscheinen der farbigen Linien ab. Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 5 Minuten ab; das Testergebnis sollte nach 5 Minuten nicht mehr abgelesen werden.

## WIE ERFOLGT DAS ABLESEN DER ERGEBNISSE?

### Negativ (nicht schwanger):


Es erscheint nur eine farbige Linie in der Kontrollzone (C). Es ist keine Linie in der Testzone (T) sichtbar. Dies bedeutet, dass eine Schwangerschaft nicht nachgewiesen wurde.

### Positiv (schwanger):

Es erscheinen deutliche farbige Linien in der Test- und Kontrollzone. Dies deutet darauf hin, dass Sie schwanger sind. Die Farbintensität der Testlinien kann von Test zu Test variieren, da zu verschiedenen Stadien der Schwangerschaft unterschiedliche Hormonkonzentrationen von hCG auftreten.

### Ungültig:

Es ist überhaupt keine Linie zu sehen bzw. eine sichtbare Linie erscheint nur in der Testzone, aber nicht in der Kontrollzone. Wiederholen Sie den Test bitte mit einem neuen Testkit. Sollte der Test wieder fehlschlagen, wenden Sie sich an einen Arzt oder an die Apotheke, in der Sie das Produkt mit der entsprechenden Chargennummer gekauft haben.

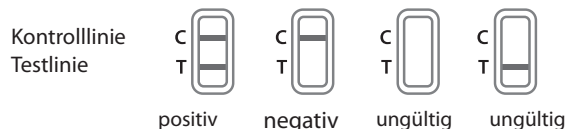

**HINWEIS** Falls die farbige Linie in der Testzone sehr schwach ist, wird eine Wiederholung des Tests nach 48 Stunden empfohlen.

## WAS SOLLTEN SIE TUN, WENN SIE DAS RESULTAT ERFAHREN HABEN?

### Wenn der Test positiv ausfällt (zwei Linien)

Suchen Sie Ihren Frauenarzt auf. Er sollte nach Auswertung aller medizinischen Untersuchungen und Laborbefunde die Schwangerschaft bei Ihnen bestätigen, da der Test unter bestimmten Umständen auch falsch positiv ausfallen

kann. Er wird Sie auch mit Informationen und Rat durch die Schwangerschaft begleiten.  
Siehe auch unter „Einschränkungen“.

## Wenn der Test negativ ausfällt (eine Linie)

Falls Sie dennoch den Verdacht haben, schwanger zu sein (z. B. Ausbleiben der Periode), können Sie den Test nach einigen Tagen wiederholen. Sollte der Test wieder negativ ausfallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.  
Siehe auch unter „Einschränkungen“.

## EINSCHRÄNKUNGEN

1. Wie bei allen Selbstdiagnosen sollte eine Schwangerschaft in jedem Fall durch einen Arzt nach Auswertung aller medizinischen Untersuchungen und Laborbefunde bestätigt werden.
2. Wenn eine Urinprobe zu stark verdünnt ist (d. h. niedriges spezifisches Gewicht), könnte der Gehalt an hCG darin nicht ausreichend sein. Sofern der Verdacht einer Schwangerschaft weiterhin besteht, sollte nach 48 Stunden eine weitere Urinprobe aufgefangen und getestet werden.
3. Niedrige hCG-Konzentrationen in der frühen Schwangerschaft können zu negativen Ergebnissen führen. In einem solchen Fall sollte eine weitere Urinprobe nach mindestens 48 Stunden aufgefangen und getestet werden.
4. Ein erhöhter Gehalt an hCG kann in Einzelfällen auch andere Ursachen als eine Schwangerschaft haben. Deshalb reicht das Vorhandensein von hCG in einer Urinprobe nicht aus, um eine Schwangerschaft sicher zu diagnostizieren, es sei denn, diese sonstigen Gründe konnten ausgeschlossen werden.
5. Nur aufgrund des hCG-Gehalts kann eine normale Schwangerschaft nicht von einer ektopischen Schwangerschaft (das befruchtete Ei nistet sich außerhalb der Gebärmutter ein) unterschieden werden. Auch spontane Fehlgeburten können das Testergebnis beeinträchtigen.
6. Sterilitätsbehandlungen auf hCG-Basis können zu falschen Ergebnissen führen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.

## ERWARTETE RESULTATE

Negative Ergebnisse sind bei gesunden, nicht schwangeren Frauen zu erwarten. Obwohl der hCG-Spiegel bei Frauen in der frühen Schwangerschaft variieren kann, ist der Ferlidona™ Schwangerschaftstest in der Lage, eine Schwangerschaft bereits einen Tag nach dem ersten Ausbleiben der Periode nachzuweisen.

## FRAGEN UND ANTWORTEN

1. **Der Farbunterschied der Kontrolllinien bei zwei verschiedenen Tests ist groß. Ist dies ein Grund zur Besorgnis?** Nein. Farbvariationen bei den Kontrolllinien haben keine Bedeutung für das Testergebnis.
2. **Dürfen Testergebnisse nach mehr als 5 Minuten abgelesen werden?** Nein. Testergebnisse müssen innerhalb von 5 Minuten abgelesen werden.

Obwohl ein positives Ergebnis sich auch nach mehreren Tagen nicht verändert, kann ein negatives Ergebnis innerhalb von Minuten nach dem Ende der Testzeit falsch positiv werden, was zur falschen Deutung des Ergebnisses führen würde. Es ist immer besser, das Ergebnis innerhalb der 5 Minuten abzulesen und dann den Test zu entsorgen, um Verunsicherungen zu vermeiden.

3. **Ein rosafarbener Hintergrund und vertikale Streifen sind im Ergebnisfeld innerhalb des Testzeitraumes entstanden. Ist dies ein Grund zur Besorgnis?**

Nein. Jede Urinprobe variiert in ihrer chemischen Zusammensetzung ebenso wie die Luftfeuchtigkeit im Raum, in dem der Test durchgeführt wird. Solche physikalischen Schwankungen können zur vertikalen Streifenbildung und/oder einem rosafarbenen Hintergrund führen, ohne dass dadurch das Testergebnis beeinträchtigt wird. Solange die Kontrolllinie innerhalb der 5 Minuten erscheint, heißt es, dass der Test wie vorgesehen funktioniert.

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im Februar 2013.

## Erklärung der Symbole auf der Verpackung:



Vor Sonnenlicht schützen.



Zwischen 4 °C und 30 °C lagern.



Trocken aufbewahren.



Nur zur einmaligen Anwendung.



Packungsbeilage beachten.



In-vitro-Diagnostikum



Inhalt der Packung ausreichend für 1 Anwendung.