

GenTeal™ HA

Benetzende Augentropfen für mehr Komfort mit Hyaluronsäure (HA)



Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf. Eine falsche Handhabung kann schwerwiegende Folgen haben.

- **Verwendungszweck:** GenTeal™ HA sind Benetzungstropfen für Personen, die unter Trockenheitsgefühl, Fremdkörpergefühl und Ermüdungserscheinungen der Augen leiden, hervorgerufen durch Reizungen wie Staub, Rauch, trockene Luft, Aufenthalt in klimatisierten Räumen und ausgedehnte Bildschirmarbeit.
- GenTeal™ HA sind Benetzungstropfen für mehr Komfort für Träger aller Kontaktlinsentypen.

Beschreibung:

GenTeal™ HA ist eine sterile, wässrige Lösung, die 0,1 % **Hyaluronsäure** (Natriumhyaluronat), Natriumchlorid, Natriumphosphat und das Konservierungssystem GenAqua™ [Natriumperborat und Phosphonsäure (Dequest 2060S)] enthält. GenAqua™ produziert in geringen Mengen Wasserstoffperoxid, das antibakteriell wirksam ist. Nach Kontakt mit der Augenoberfläche zerfällt Wasserstoffperoxid innerhalb einer Minute in Sauerstoff und Wasser.

STERILE	A
---------	---

Hergestellt unter keimfreien Bedingungen




Anwendungsvorschriften:

- Verwenden Sie GenTeal™ HA Benetzungstropfen bei Bedarf.
- Waschen Sie Ihre Hände vor dem Benutzen.
- Tropfen Sie 1–2 Tropfen in jedes Auge und blinzeln Sie mehrere Male (vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tropferspitze zu berühren).
- Wenn Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist Linsen angepasst hat, die über Nacht getragen werden können, verwenden Sie GenTeal™ HA Benetzungstropfen nach Bedarf auch nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen.


Gegenanzeigen:

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Vor der ersten Anwendung die Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch und bewahren Sie diese nicht über 25 °C auf.  25°C
- Geöffnete Flasche innerhalb von 12 Wochen aufbrauchen. Die restliche Lösung verwerfen.
- Verwenden Sie die Lösung nicht  nach Ablauf des Verfallsdatums. 
- Berühren Sie nie mit der Tropferspitze der Flasche eine Oberfläche oder das Auge, da dies die Lösung verunreinigen könnte.
- Mit dem Inhalt der Flasche sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

Warnhinweise:

- Auf keinen Fall GenTeal™ HA verdünnen oder mit anderen Lösungen mischen. Dies zerstört die Wirksamkeit der Lösung.
- Falls Sie trotz Beseitigung möglicher Reizungsgründe noch Irritationen empfinden, sollten Sie den Augenarzt aufsuchen, da diese Augenreizungen eventuell medizinische Ursachen haben.
- **Bringen Sie NIEMALS Ihre Kontaktlinsen mit unsterilem Wasser (einschließlich Leitungswasser) in Verbindung, da dadurch eine mikrobielle Verunreinigung erfolgen kann, was zu dauerhaften Schädigungen der Augen führen kann.**
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
- Bevor Sie ein Medikament mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten.

Hinweis:

Sollten Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, setzen Sie bitte GenTeal™ HA ab und suchen Sie Ihren Arzt auf. Kontaktlinsenträger sollten ihre Kontaktlinsen entfernen.

Packungsinhalt:

1 x 10 ml oder

3 x 10 ml Vorteilspackung

Bonuspunkte für die Treuekarte:

1

3

CE₀₁₂₃

Hersteller:

Ciba Vision Sterile Manufacturing Ltd.
6515 Kitimat Road
Mississauga, Ontario L5N2X5
Canada

Bevollmächtigter in der Europäischen Union:

Novartis Farma
Largo Boccioni 1
21040 Origgio (VA)
Italien

Vertrieb in Deutschland durch:

Novartis Pharma GmbH
D-90327 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653
Internet/E-Mail: www.novartis.de

Stand der Information:

Januar 2008