



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

OHROPAX® Clean

Meerwasser Ohrreinigungsspray

Medizinprodukt zur gezielten Reinigung und Pflege der Ohren

OHROPAX Clean Ohrreinigungsspray ist eine hypertonische Meersalzlösung

- auch für Kinder geeignet (ab 6 Jahren)
- beugt der Bildung von Ohrenschmalzpfröpfen vor
- mit Sicherheits-Sprühkopf für besonders sanfte und feine Zerstäubung

Zusammensetzung:

- 10 g Lösung enthalten:
- 0,3 g Meersalz (aus dem Toten Meer)
- gereinigtes Wasser

Darreichungsform:

- Pumpspray-Flasche mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in das Ohr.
- 100 % natürlich, ohne Treibgas, ohne Konservierungsmittel



OHROPAX GmbH
Am Kappengraben 17
D-61273 Wehrheim
Tel. 0 60 81 95 30 60
Fax 0 60 81 95 30 69
info@ohropax.de

Anwendungsgebiete:


Der Gehörgang erzeugt natürlicherweise Cerumen (Ohrenschmalz), in dem Staub, Bakterien und Unreinheiten festgehalten werden. Das Cerumen erfüllt damit eine wichtige Schutzfunktion für das empfindliche Trommelfell. Durch ständige Wanderung abgelöster Hautschüppchen vom Trommelfell nach außen reinigt sich das Ohr mit Hilfe des Cerumens quasi selbst. Es genügt dann zumeist, die Ohrmuschel im Rahmen der normalen Körperpflege zu säubern. In bestimmten Situationen ist dies jedoch nicht mehr ausreichend und bedarf der unterstützenden Reinigung und Pflege. Eine solche Notwendigkeit entsteht z. B. bei besonderen anatomischen Ohrverhältnissen, bei stärkerer Staubbelastung, einer Überproduktion von Ohrenschmalz bei fieberhaften Erkrankungen oder durch hormonelle Beeinflussung sowie gelegentlich auch bei Hörgeräteträgern. Durch seinen feinen Sprühnebel ist OHROPAX Clean Ohrreinigungsspray eine sanfte Hilfe, um eine gefahrlose Reinigung des Gehörganges zu ermöglichen. Die hypertonische Meersalzlösung verflüssigt das Cerumen und löst es auf, wodurch es auf natürlichem Weg entfernt wird. Auch der

Bildung von Cerumen-Ohrenpfropfen wird auf diese Weise vorgebeugt.

Durch OHROPAX Clean Ohrreinigungsspray erübrigt sich der Gebrauch von Wattestäbchen, die das Ohrenschmalz in Richtung Trommelfell schieben und zu einer Pfropfenbildung führen können.

Anwendung:

OHROPAX Clean wird je nach Bedarf 1- bis 2-mal täglich angewendet.

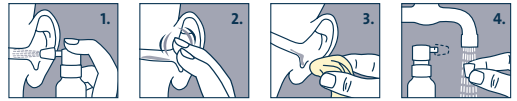

1. Die Flasche aufrecht vor das Ohr halten. Auf den Aufsatz drücken und 1- bis 2-mal in das Ohr sprühen.
2. Für noch bessere Wirksamkeit den Ohrenansatz einige Sekunden lang massieren.
3. Den Kopf schräg halten und die ablaufende Flüssigkeit mit einem Tuch abtupfen.
4. Nach jeder Anwendung den Sprühaufsatz mit warmem Wasser abspülen und trocknen.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen empfehlen wir, die Flasche nur von einer Person benutzen zu lassen.

Nach der Anwendung sollten Sie das Ohr nicht mit Watte oder Ähnlichem verschließen.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen medizinischen Ohrenspray oder -tropfen sollten Sie OHROPAX Clean Ohrreinigungsspray vorher anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Gegen die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit bestehen keine Bedenken.

Nicht ohne ärztlichen Rat anwenden bei:

- Otitis oder anderen Entzündungen des Gehörganges oder Innenohres
- Ohrenschmerzen
- perforiertem Trommelfell
- Morbus Menière
- Schwindel, Benommenheit
- nach Mastoid-Operation
- bei Fremdkörpern im Ohr

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum dieses Produktes ist auf der Flasche und der äußeren Verpackung aufgedruckt (siehe).

Verwenden Sie OHROPAX Clean Ohrreinigungsspray nicht mehr nach diesem Datum! Nach Anbruch der Flasche nicht länger als 4 Wochen verwenden.

Das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

Juni 2014