




Bezeichnung	Wärmeschal – Coselle
Artikelnummer	11153250
Beschreibung	Plüschschal, gefüllt mit aromatischer Mischung aus Körnern und Gesundheitskräutern. Außenhülle waschbar. Medizinisches Produkt.
Füllung	Bio-Hirse mit Duftmischung aus Lavendel, Rosmarin, Eukalyptus und Pfefferminz
Material	Plüsch, 100% Polyester
EAN	4260418740264
Zolltarif-Nr.	6307909899
Verpackung	1 Stück
Gewicht	Ca. 920 Gramm
Größe L/B/H	ca. 103 x 16 x 3 cm
Verpackung L/B/H	ca. 16 x 32,5 x 6 cm, im Geschenkkarton
Hersteller	Marvida GmbH & Co KG
Ursprungsland	Made in Europe
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ~ Produkt auspacken und ggf. vorhandene Anhänger entfernen ~ Das saubere Produkt so wie es ist in die Mikrowelle legen. Aufwärmzeit: 90 Sek. bei maximal 800 Watt. Fertig. ~ Optional im Backofen erwärmen: 12 Min. bei 100° C. ~ Das aufgewärmte Produkt kann sofort verwendet werden.

Nach jeder Mikrowellenanwendung ist das Produkt absolut keimfrei.

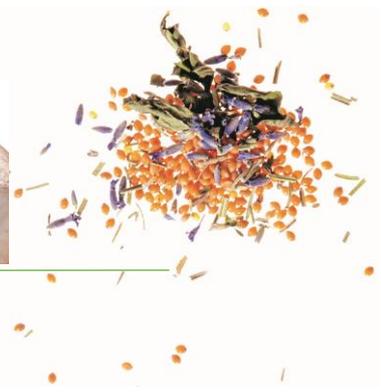

GEBRAUCHSHINWEISE

(Bitte lesen Sie die folgenden Gebrauchshinweise gut durch und bewahren Sie diese auf.)

WÄRMEANWENDUNG: marvida care-Wärmeprodukte sind die ideale Alternative zur Wärmflasche: Die Anwendung ist einfacher und sicherer – das umständliche Einfüllen von kochend heißem Wasser entfällt.

Die sanfte Wärme hält besonders lange an – und auch nach dem Abkühlen bleiben marvida care-Wärmeprodukte körperwarm und kuschelig. Und dann ist da noch dieser beruhigende Duft der Gesundheitskräuter: So geht Wohlbefinden!

Einsatzbereiche: als Bettwärmer, Fußwärmer, zur Beruhigung; bei Bauchschmerzen, Erkältungs- und Grippe-symptomen, Menstruationsbeschwerden und Verspannungen. **Gegenanzeigen:** Wärmeanwendungen können kontraproduktiv sein bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kreislaufbeschwerden, beeinträchtigtem Hautgefühl (Kälte-/Hitzeunempfindlichkeit). marvida care Wärmepantoffeln sind nicht als Laufschuhe konzipiert und sollten von Diabetikern – im Falle einer verminderten Wärmewahrnehmung in den Füßen – nur dann benutzt werden, wenn vor Nutzung die Wärmekontrolle sichergestellt werden kann. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker.

Erwärmung in der Mikrowelle: Erwärmen Sie das marvida care-Wärmeprodukt max.

60 Sekunden bei max. 750 Watt in der sauberen Mikrowelle. Papieretiketten sind vorher zu entfernen. Bei Ersterwärmung kann es durch die natürliche Korn-Kräuter-Füllung zu geringfügiger Feuchtigkeitsentwicklung kommen.

ACHTUNG: Das Wärmeprodukt darf bei Erwärmung nicht verschmutzt oder feucht sein, da es sonst beschädigt werden kann. Es muss vor erneuter Erwärmung auf Zimmertemperatur abgekühlt sein. Mikrowellen sollten nur unter Aufsicht Erwachsener bedient werden. Eine vorhandene Grillfunktion muss ausgeschaltet sein. Achten Sie darauf, dass sich der Drehteller frei dreht. Vor Weitergabe an Kinder sollte überprüft werden, dass das Wärmeprodukt nicht zu heiß ist. **Erwärmung im Backofen:** Backofen auf 100° C vorheizen und Ihr marvida care-Wärmeprodukt auf einem Teller oder auf Backpapier 10 Minuten aufheizen. Der Backofen muss sauber, die Grillfunktion ausgeschaltet sein.

KÄLTEANWENDUNG: Alternativ hält das Körnerkissen auch Kälte sehr gut. Material und Verarbeitung von marvida care-Wärmeprodukten sind so ausgelegt, dass sie auch problemlos als Kühlkomresse genutzt werden können.

Einsatzbereiche: bei Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen; zur Minderung von Schwellungen und Entzündungen; bei Insektenstichen, Zahn- und Kopfschmerzen. **Gegenanzeigen:** Kälteanwendungen können bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kreislaufbeschwerden oder beeinträchtigtem Hautgefühl (Kälte-/ Hitzeunempfindlichkeit) kontraproduktiv sein. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker. **Kühlung im Kühl- oder Gefrierschrank:** Wickeln Sie das komplette marvida care- Wärmeprodukt, um es vor Feuchtigkeit zu schützen, einfach in eine Plastiktüte. Legen Sie es max. 2 Stunden in einen Kühlschrank oder max. 1 Stunde in das Gefrierfach. Anschließend verfügen Sie über eine wohltuende Kältekomresse.

ALLGEMEINE HINWEISE

Haltbarkeit: Hohe Verarbeitungsqualität und reißfeste Materialien machen marvida care-Produkte sehr langlebig – sachgemäße Behandlung vorausgesetzt. Bitte lagern Sie Ihr marvida care Produkt stets trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Die Körnerkissen können beliebig oft erwärmt werden, ohne Ihre Speicherfähigkeit zu verlieren. Der Duft bleibt mehrere Monate stabil, erst dann lässt er ganz langsam nach. Mit einigen Tropfen Duftöl auf das bereits erwärmte Körnerkissen können Sie den Duft auffrischen; Sie können aber auch Ersatz-Füllungen bei uns bestellen.

Reinigung: Bei allen marvida care-Produkten lassen sich die Körnerkissen herausnehmen; die leere Stoffhülle können Sie mit der Hand oder bei maximal 30° C im Schonwaschgang der Waschmaschine waschen. Das Körnerkissen ist nach jeder Mikrowellenanwendung absolut keimfrei.

Entsorgung: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. marvida care-Wärmeprodukte können im Hausmüll entsorgt werden.

Angaben zur Füllung: Das Körnerkissen ist mit naturbelassenen Körnern und Kräutern gefüllt. Diese sind ungiftig, aber nicht zum Verzehr geeignet. Sollten sie dennoch verschluckt werden, besteht keine Gefahr.



Unser Markenversprechen an Sie:



Zertifizierte Bio-Hirse mit
Gesundheitskräutern und
Wohlfühlduft



Wir legen Wert auf Fair-
ness & Nachhaltigkeit



Mit herausnehmbaren
Füllungen & waschbaren
Außenhüllen



Kuschelige Materialien,
Liebevolle Designs



Teilweise zertifiziert
als ausgewiesene
Medizinprodukte



In sozialen Werkstätten in
der Pfalz gefüllt



Sowohl zum Wärmen als
auch zum Kühlen geeignet